


## Istruzioni per l'esecuzione del test (Sangue materno)

### Consenso informato e modulo di richiesta esame

**IMPORTANTE:** Compila tutte le voci del Modulo di Richiesta Esame per evitare ritardi e per assicurare una refertazione tempestiva. Per assicurare l'accettazione del campione del paziente per l'analisi, verifica che il Consenso Informato sia stato firmato e inserito nel kit insieme ai campioni.

### Istruzioni prelievo ematico

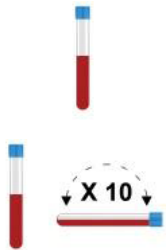

- Prendere la provetta da 10 ml dal contenitore di trasporto
- Scrivere la **data del prelievo** ematico
- Riempire la provetta quasi completamente di sangue intero
- Agitare la provetta circa **10 volte**.

Mantenere la provetta a **temperatura ambiente** fino alla spedizione. **Non conservare la provetta in freezer!**

### Confezionamento e Spedizione:

**IMPORTANTE:** Mantenere il kit a **temperatura ambiente**.


- Riporre la provetta riempita ed etichettata nel contenitore di trasporto.
- Inserire il **modulo di richiesta esame** e il **consenso informato**, precedentemente compilati, nella parte laterale del contenitore di trasporto.
- Riporre le provette dentro la spugna e riporre entrambi nella busta biohazard. Chiudere la scatola.
- Sistemare la scatola dentro la busta del corriere e sigillare.
- Se si spedisce più di un contenitore di trasporto, sistemarne il più possibile in una busta del corriere.
- Aderire la bolla di spedizione del corriere all'esterno del pacco del corriere. Inserire la bolla nella tasca.
- **Chiamare il corriere** per organizzare il ritiro del campione.
- Spedire i campioni, preferibilmente lo **stesso giorno** del prelievo. I campioni devono arrivare al Laboratorio Genoma entro 5 giorni dalla data del prelievo. Il campione dovrebbe essere spedito entro un giorno dal suo prelievo. Genoma accetta campioni da lunedì a sabato.

## Istruzioni per l'esecuzione del test (DNA paterno)

### ATTENZIONE!


Per effettuare correttamente la procedura di raccolta non invasiva del DNA, mediante tampone buccale, bisogna ricordare al paziente che durante l'ora precedente alla raccolta è importante:

- Non mangiare
- Non bere
- Non fumare
- Non masticare gomme
- Non lavare i denti

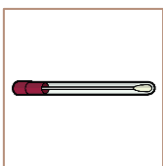


1. Aprire la confezione.
2. Estrarre il tampone dalla provetta.


Attenzione! Non toccare la parte in cotone del tampone per evitare la contaminazione!

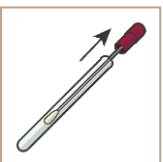

3. È consigliabile strofinare il tampone su entrambe le guance e sulla mucosa interna delle labbra.

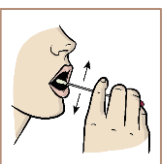

4. Ripetere l'azione più volte accertandosi di avere eseguito correttamente la procedura. Per una raccolta standard è necessario strofinare per almeno 60 secondi.

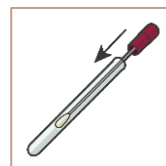

5. Inserire nuovamente il tampone nella provetta.
6. Chiudere accuratamente il tampone fino a sentirne lo scatto definitivo che preserverà il campione durante la spedizione. Applicare l'etichetta con il nome del paziente sulla provetta.
8. Il DNA così raccolto si spedisce a temperatura ambiente all'interno della scatola corredato di foglio di accettazione.
9. Inserire tutto nella busta del corriere e procedere alla spedizione.